


Chirurgický obvazovací simulátor

LF00929 Návod k obsluze

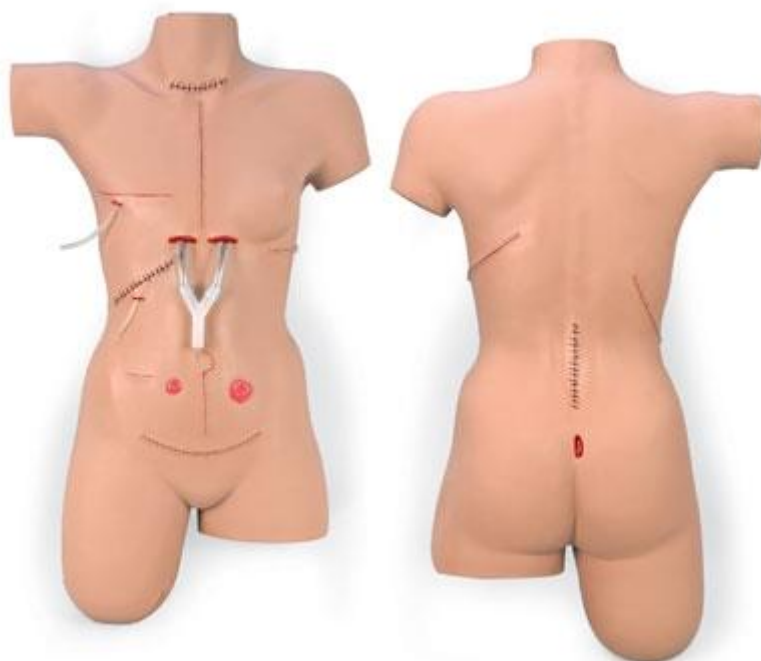

Kladská 1082
500 03 Hradec Králové 3
tel: 495 220 229
495 220 394
GSM brána: 602 123 096
E-mail: info@helago-cz.cz
<http://www.helago.cz>


O modelu...

Model je replikou těla ženy se čtrnácti chirurgickými ranami včetně střední sternotomie s drenáží hrudníku, sakrálním dekubitálním vředem 2. stupně a pahýlem po amputaci nohy. Simulátor je vyroben z vylepšené kůže, která je sušší, a díky tomu k ní lépe přilnou obvazy. Rány byly aktualizovány o chirurgické svorky pro střední sternotomii, thoraktomii, nefrektomii, laparotomii, abdominální hysterektomii, a pahýl po amputaci.

Části modelu:

Tento vylepšený simulátor je "snadno dostupným pacientem" se čtrnácti chirurgickými ranami pro nácvik obvazování a krytí:

- thyreoidektomie
- střední sternotomie s drenáží hrudníku
 - mastektomie se simulovanou drenáží
- cholecystektomie se simulovaným T-drénem
 - laparotomie
- appendektomie
- kolostomie
- ileostomie
- abdominální hysterektomie
- thorakotomie
- nefrektomie
- laminektomie
- sakrální dekubitální vřed - stupeň 2
- pahýl po amputaci nohy

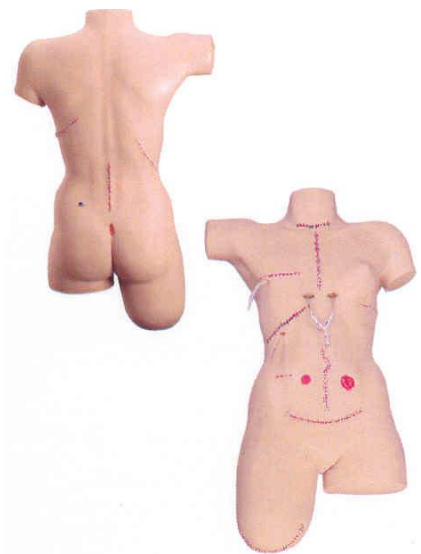

Simulátor je dodáván s přenosným kufríkem.

Upozornění

1. Nikdy nepokládejte simulátor na potíštěný papír nebo plast, mohly by způsobit neodstranitelné skvrny, stejně jako propisovací tužky.
2. K odstranění odolných nečistot nepoužívejte rozpouštědla nebo žíraviny. Používejte pouze odstraňovač lepidla Glue-Off (LF01023)
3. Nepoužívejte jódové roztoky, mohly by způsobit neodstranitelné skvrny.

Péče o model

Normální nečistoty můžete odstranit jemnou mýdlovou vodou. Odolné skvrny odstraňte pomocí REN čističe. Jednoduše ho nastříkejte na špinavé místo a setřete jemným hadříkem nebo papírovým ubrouskem.