

Kanylační a injekční polštářky

00140

00161

00211

Návod k obsluze




Kladská 1082
500 03 Hradec Králové 3
tel: 495 220 229
495 220 394
fax: 495 220 154
GSM brána: 602 123 096
E-mail: info@helago-cz.cz
<http://www.helago-cz.cz>

Tato řada modelů obsahuje ALT00140 KANYLAČNÍ POLŠTÁŘEK-ANTEKUBITÁLNÍ JAMKA, ALT00161 PEDIATRICKÝ POLŠTÁŘEK PRO KANYLACI a ALT00211 ROZŠÍŘENÁ VLOŽKA PRO ZAVEDENÍ KANYLY. Tyto modely se používají pro odběr umělé krve a vložení kanyly. Žíly mají samotěsnící mechanismus a jsou určeny k opakovanému použití. Je možné je snadno naplnit umělou krví. Všechny modely s výjimkou ALT00211 mají vyměnitelnou horní vrstvu pokožky a vyměnitelné žíly.



Naplnění žil krví

1. Krev může být zavedena pomocí jednocestného ventilu umístěného na konci kanylačního polštářku, pomocí stříkačky nebo vstříknutím do žíly (obr. 1). Dbejte na to, abyste žíly nenaplňovali větším množstvím krve než 2 - 3 ml, protože by mohlo dojít k vylučování kapaliny. Při správném zacházení je životnost žil poměrně dlouhá (obvykle 25 – 50 aplikací).

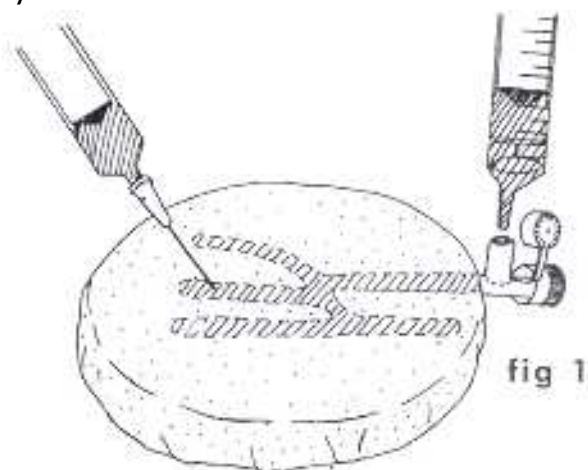


Umístění kanylačních polštářků

1. Když umístíte kanylační polštářek ALT00211 na loket bude odrážet anatomii žilní struktury antekubitální jamky na pravé straně (obr. 2).
2. ALT00161 neodráží anatomii a je navržen tak, aby mohl být namontován na paži, jeho umístění záleží na velikosti příslušného pacienta (obr. 3).

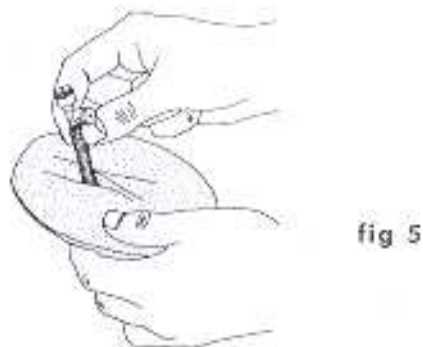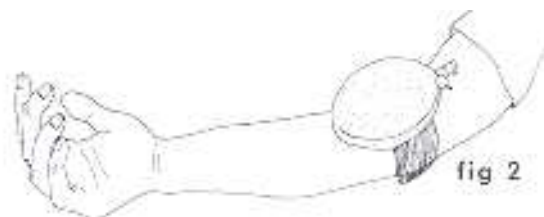

1. Žíla u modelu ALT00211 může být použita mnohokrát a lze ji naplnit pomocí jehly (obr. 4). Dbejte na to, abyste žílu nenaplňovali větším množstvím krve než 2 - 3 ml, protože by mohlo dojít k vylučování kapaliny.

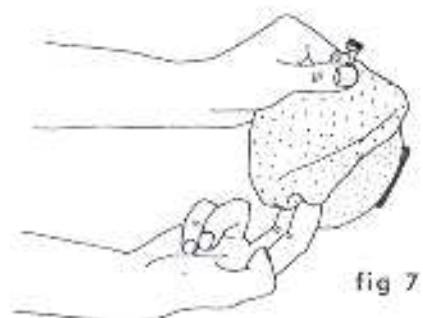

Výměna žil a vrchní vrstvy pokožky

1. Nejprve sejměte vrchní vrstvu pokožky a poté jemně oddělte žíly od podložky (obr. 5)
2. Držte kanylační polštářek za hrany a mírně ho ohněte tak, aby horní hrana kanylačního polštářku, do které se vkládají žíly, byla mírně vypouklá. To umožní snadnější vložení žil do příslušných drážek (obr. 6).
3. Uvolněte polštářek a nechte podložku, aby se znovu vytvarovala okolo žil.
4. Proved'te výměnu vrchní vrstvy pokožky obvyklým způsobem, ujistěte se, že je položena hladce a rovnoměrně na kanylačním polštářku (obr. 7).
5. Nyní je kanylační polštářek připraven k použití.

Péče o modely vyrobené z latexové pěnové gumy

1. Latexová guma je přírodní produkt. Skladujte ho mimo působení ostrého světla a v neprodyšném sáčku. Modely neskladujte v blízkosti elektronických přístrojů včetně telefonů nebo počítačů.
2. Před tím, než začnete model používat, si umyjte ruce.
3. Modely lze umývat jakýmkoliv mýdlem. Po umytí je řádně opláchněte vodou.
4. Modely nepolykejte a po jejich použití proved'te obvyklou hygienu.