



12/2004; 4. vydání
9200-0069

Pacientské stolky k lůžku



ELEGANZA CLASSIC, ELEGANZA MANO

Návod na obsluhu a technický popis

Linet spol. s r.o.
274 01 Slaný
Želečnice 5
Tel.: 312 576 111
Fax: 312 522 668

Pacientské stolky k lůžku

Vážení zákazníci,

děkujeme, že jste se rozhodli zakoupit výrobek naší společnosti a věříme, že s ním budete spokojeni po celou dobu jeho užívání. Díky velmi pečlivému výběru materiálů, nejmodernější výrobní technologii a pečlivé práci našich pracovníků dosahují naše výrobky parametrů, které zaručují vysokou kvalitu, spolehlivost a trvalou užitnou hodnotu.

Úvod

Stolky jsou určeny pro pacienty hospitalizované na standardních i specializovaných odděleních nemocnic i pro osoby upoutané na lůžko v oblasti sociální, seniorské, resp. domácí péče. Pacientské stolky k lůžku jsou vhodné pro použití v kombinaci s nejrozličnějšími typy polohovatelných lůžek. Výrobce pracuje podle certifikovaného systému řízení jakosti dle norem DIN EN ISO 9001:2000, EN ISO 13485:2003, ISO 14001:2004. Výrobek je vyroben v souladu s Nařízením vlády č. 336/2004, které stanovuje technické požadavky na prostředky zdravotnické techniky.

! Před počátkem manipulace se stolem je nutné se podrobně seznámit s tímto návodem. Veškeré úkony a obsluha stolu musí být prováděny v souladu s návodem! Jakékoliv jiné úkony, které jsou v rozporu s návodem na použití nebo s účelem použití stolu jsou prováděny na vlastní riziko a výrobce neodpovídá za případné vzniklé škody. Proto je důležité, aby návod byl po celou dobu životnosti stolu dostupný pro uživatele!

! Stolek ELEGANZA MANO je určen pro samostatné ovládání pacientem, proto je nutné podrobně seznámit pacienta s veškerými funkcemi stolu. Výběr pacientů, kterým bude umožněno používat stolek, tudíž závisí na jejich fyzickém a psychologickém stavu, který posuzuje ošetřující lékař!

Výrobek není určen výrobcem pro pacienty se sníženou schopností běžného logického uvažování nebo s psychologickými poruchami. Stolek mohou obsluhovat pacienti se zachovanou pohyblivostí a citlivostí alespoň jedné horní končetiny.

Použití stolu pro nevhodné pacienty může mít za následek újmu na zdraví pacienta (opáření, horkými pokrmami a tekutinami), resp. poškození stolu nebo okolního interiéru (lůžko, nábytek, přístroje). Stolek ELEGANZA CLASSIC mohou obsluhovat hospitalizované osoby buď samostatně nebo za současně asistence zdravotnického personálu.

UPOZORNĚNÍ:

- Základní zaškolení (instruktaž) pro obsluhu stolu provede výrobce, distributor, příp. pověřená osoba. Zaškolení se potvrzuje protokolem.

Způsob dodávky a balení

Stolky jsou standardně dodávány veškeré zabalené v ochranné fólii z PE a kartonovém papíru. Za příplatek mohou být stolky dodávány ve speciálních obalech upravených pro námořní, resp. leteckou přepravu.

! Dle dodacího listu musí být na místě v okamžiku předání dodávky provedena kontrola kompletnosti celé dodávky. O eventuálních závadách nebo poškozeních musí být bez zbytečného odkladu vyhotoven protokoly zápis. Zjištěné nedostatky musí být bez zbytečného odkladu oznámeny současně dopravci, dodavateli a výrobcí písemnou formou.

! Při jízdě se stolem během nakládky a vykládky je nutné dbát na to, aby stolek byl odbrzděn. Kolečka stolu jsou určena k použití ve vnitřním prostředí a k jízdě po rovných, hladkých a čistých podlahách (keramická dlažba, linoleum, lité podlahy apod.). Při jízdě po drsném, nerovném a znečištěném povrchu může dojít k poškození koleček.

Transport

! Při transportu je důležité zajistit jednotlivá balení tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození!

Bezpečnostní pokyny

- ⚠ stůlek smí být používán jen na rovných a pevných plochách
- ⚠ jídelní deska stolu a jeho jednotlivé zásuvky nesmějí být přetěžovány přes uvedenou mez
- ⚠ není dovoleno se opírat o vyklápenou jídelní desku; při použití desky jako opěrky při vstávání hrozí úraz pacienta nebo poškození stolu a na něm položených předmětů
- ⚠ při ovládání jídelní desky a zásuvek je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k úrazu prstů pacienta nebo obsluhy
- ⚠ stůlek nesmí být používán, pokud byly zjištěny závady, které mohou poškodit osobu ležící na lůžku, personál či třetí osobu, stůlek nebo okolní interiéry
- ⚠ obsluhující personál je povinen zaškolit pacienta s používáním stolu
- ⚠ uživatel se před použitím musí přesvědčit o funkčnosti a bezpečném stavu stolu
- ⚠ manipulace se stolkem smí být umožněna pouze pacientům, jejichž fyzický a psychologický stav zaručuje bezpečné a bezproblémové používání
- ⚠ při opravách stolu lze používat pouze originální materiály a součásti; při náhradě poškozených částí neoriginálními nebo nevhodnými materiály a součástmi výrobce neodpovídá za případné vzniklé škody
- ⚠ při údržbě a čištění postupujte podle návodu; používáním myček pro čištění stolu dochází k jeho poškození

Použití

Stůlek smí být používán v prostředí, kde : rozsah teplot okolí je od + 10°C do + 40°C
rozsah relativní vlhkosti je od 30% do 75%
rozsah atmosférického tlaku je od 700 hPa do 1060 hPa

⚠ Za případné škody nebo úrazy vzniklé v důsledku používání mimo předepsané podmínky výrobce neručí!

Technické parametry

STOLEK ELEGANZA	CLASSIC	MANO
Vnější rozměry (rozměry korpusu bez vyklápení desky)	500 x 515 mm	510 x 485 mm
Výška stolu (horní desky)	885 mm	885 mm
Rozměry jídelní desky (užitná plocha mezi bočními lištami)	590 x 337 mm	590 x 337 mm
Rozměry horní desky (užitná plocha mezi bočními lištami)	465 x 415 mm	410 x 380 mm
Výškové nastavení jídelní desky	cca 730 – 1060 mm	cca 730 – 1100 mm
Maximální zatížení jídelní desky (na konci desky)	5 kg	5 kg
Maximální zatížení jídelní desky (vprůstřed desky)	9 kg	9 kg
Maximální zatížení horní zásuvky	5 kg	5 kg
Maximální zatížení spodní zásuvky	-	10 kg
Průměr koleček	75 mm	75 mm
Vnitřní průměr držáku příslušenství	16 mm	16 mm
Hmotnost stolu	35 kg	35 kg

Specifikace variant


Následující tabulka uvádí přehled základních variant stolů spolu s jejich označením modelovými čísly:

	CLASSIC	CLASSIC	MANO	MANO
Popis varianty	Bez jídelní desky	S jídelní deskou	S jídelní deskou, Horní zásuvka bez zámků	S jídelní deskou, Horní zásuvka se zámkem
Modelové číslo	121E22E/BX060	123E22E/BXE60	12G001121200X	12G001141200X
Popis varianty			Bez jídelní desky, Horní zásuvka bez zámků	Bez jídelní desky, Horní zásuvka se zámkem
Modelové číslo			12G001021200X	12G001041200X

Vše uvedené modely stolů mohou být dále dodávány v různých odstínech HPL horní a jídelní desky. Tato skutečnost je vyjádřena v modelovém čísle pomocí pozice X, která nabyvá následujících hodnot:


- X = 3; odstín HPL = U1716 (světle modrá)
- X = 4; odstín HPL = U1898 (světle zelená - pepernin)
- X = 5; odstín HPL = U1574 (světle žlutá)
- X = 6; odstín HPL = U1011 (jasně bílá)
- X = W; odstín HPL = R5313 (buk 01)
- X = 7 (stůlek MANO) nebo G (stůlek CLASSIC); odstín HPL = U1596 (vanilka)

Popis stolu ELEGANZA CLASSIC

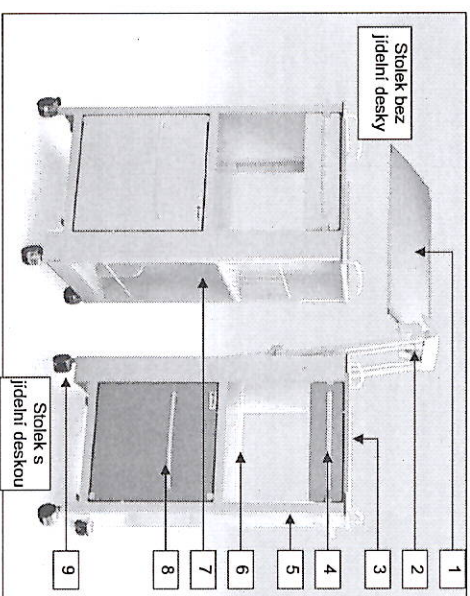

1. Jídelní deska z HPL s bočními plastovými lištami
2. Mechanismus výškového nastavení a náklonu desky
3. Vrchní deska z HPL s kovovými madly a plastovými lištami na okrajích
4. Zásuvka z HPL
5. Kovový korpus
6. Ověřený úložný prostor (níka)
7. Boční plastová vložka s držákem časopisů a lahví (pouze stolek bez desky)
8. Spodní skříňka s dvířky z HPL a kovovým lakovaným madlem
9. Dvojitě kolečko 75 mm s individuálním brzděním

Popis stolu ELEGANZA MANO

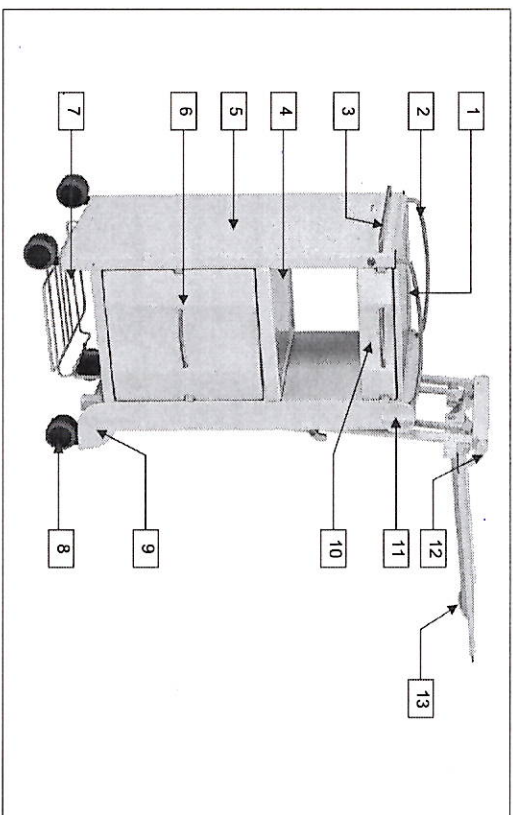


1. Vrchní deska stolu z vysokolakového laminátu
2. Kovové madlo pro uchopení při jízdě
3. Madlo pro zavěšení ručičku s univerzálním držákem příslušenství
4. Ověřený úložný prostor (níka)
5. Kovový korpus
6. Spodní velká zásuvka s plastovým čelem
7. Držák na umístění podložní misky, bačkor apod.
8. Dvojitě kolečko 75 mm s centrálním brzděním
9. Plastový kryt koleček
10. Vrchní menší zásuvka
11. Madlo pro centrální brzdění koleček
12. Mechanismus výškového nastavení desky
13. Jídelní deska s výškovým nastavením a náklonem

Ovládání stolu

Centrální brzdění koleček (pouze stůl ELEGANZA MANO)

Jeden pár koleček na straně jídelní desky lze zabrzdit pomocí otočných plastových madel umístěných v rozích horní desky. Druhý pár koleček na druhé straně zůstává nezabrzdnutý. Umístění ovládacích madel umožňuje zabrzdnutí stolu i pacientovi ležícímu na lůžku bez nutnosti přivolávání sestry. Po zabrzdnutí stolu lze provádět úkony jako je manipulace se zásuvkami nebo s jídelní deskou, které by v nezabrzdnutém stavu byly proveditelné jen velice těžko.

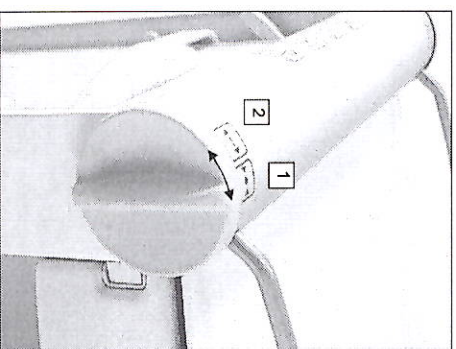

Otočením madla do polohy 1 dojde k zabrzdnutí stolu.

Otočením madla do polohy 2 dojde k odbrzdnutí stolu.


Obě funkční polohy madel jsou znázorněny pomocí červeného a zeleného piktogramu:



1 = zabrzdnuto

2 = odbrzdnuto

Individuální brzdění koleček (pouze stůl ELEGANZA CLASSIC)

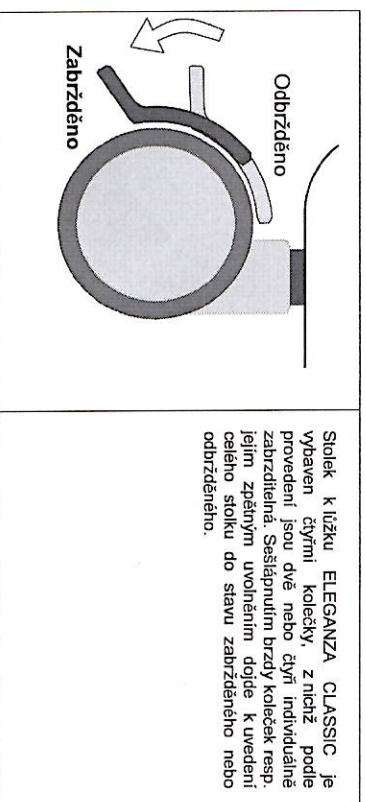

Stůl k lůžku ELEGANZA CLASSIC je vybaven čtyřmi kolečky, z nichž podle provedení jsou dvě nebo čtyři individuálně zabrzdnutelná. Sešlápnutím brzdy koleček resp. jejím zpětným uvolněním dojde k uvedení celého stolu do stavu zabrzdnutého nebo odbrzdnutého.

Zásuvky a skříňka

Stůl ELEGANZA MANO je vybaven dvěma zásuvkami, které umožňují oboustrannou manipulaci a mají vyjímatelné plastové vložky. Horní zásuvka slouží pro uložení drobných předmětů denní potřeby (brýle, telefon, dokady, aid) a její maximální nosnost činí 5 kg. Horní zásuvka může být na přání vybavena zámkem.

Spodní větší zásuvka s maximální nosností 10 kg je určena pro úschovu šatstva a jiných objemnějších věcí. Tato zásuvka je vybavena držákem na 3 PET láhve o objemu 1,5 l.



Stůl k lůžku ELEGANZA CLASSIC je vybaven na rozdíl od stolu ELEGANZA MANO zásuvkou a skříňkou. Jak zásuvka, tak skříňka jsou přizpůsobeny pro oboustranné použití stolu. Pro zásuvku platí stejná nosnost jako pro horní zásuvku stolu ELEGANZA MANO a skříňka může být navíc doplněna na přání zámkem ve dvířkách.



Při manipulaci je třeba držet zásuvku za madlo, aby nedošlo k usknutí ruky nebo prstu pacienta při zavírání



Při manipulaci se zásuvkami je nutné, aby kolečka stolu byla v zabrzdnutém stavu

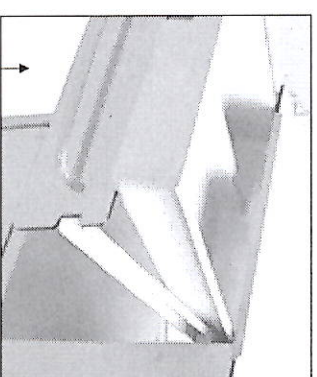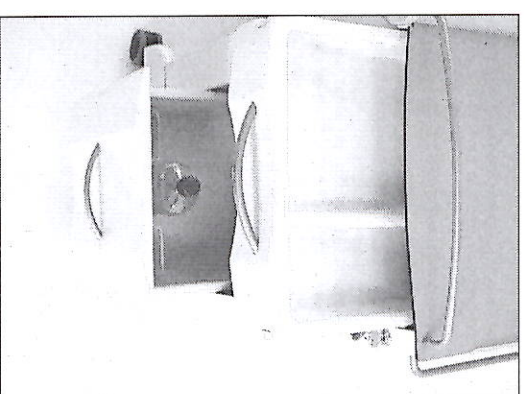


Zásuvka stolu ELEGANZA CLASSIC s vyjímatelnou plastovou vložkou
Malá horní zásuvka a větší spodní zásuvka stolu ELEGANZA MANO


Ovládání jídelní desky

Jídelní desku je možno vykloupat a následně výškově nastavit a naklopit pomocí mechanismu integrovaného do korpusu stolu. Není-li deska využívána, je vhodné ji ponechávat v základní poloze, tedy skrytou v korpusu stolu, kdy deska zbytkčně nepřekáží při provádění různých úkonů v okolí stolu. Způsob manipulace s jídelní deskou je totožný pro stolek ELEGANZA MANO i CLASSIC.

Vyklopení jídelní desky

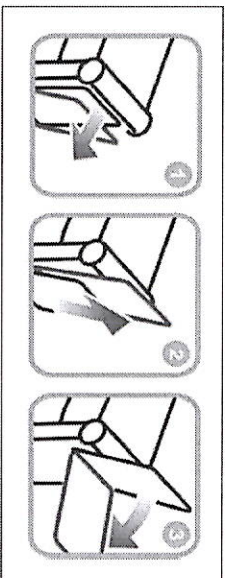


1. Tažením za madlo ve směru od korpusu (šipka na obr. 1) vykloupe desku ven z korpusu stolu.
2. Tažením za madlo směrem vzhůru uvedete desku do polohy určené pro sklopení (obr. 2).
3. Sklopte desku do vodorovné polohy (obr. 3)

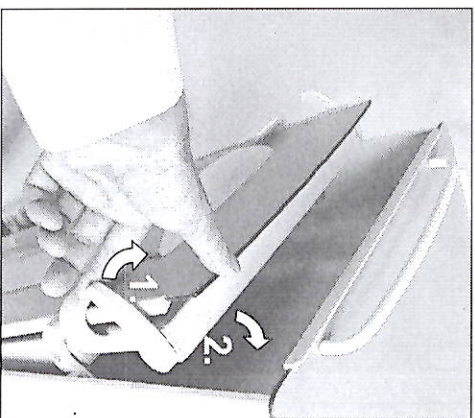

Pro uvedení jídelní desky do výchozího stavu (deska je integrována v korpusu) se použije stejný postup jako při vykloupení, pouze v opačném sledu a s opačným směrem jednotlivých kroků. Pro zpětné přiklopení mechaniky s deskou ke stolu je třeba uvolnit aretační páčku jejím stiskem ve směru šipky 1 na obrázku.

Výškové nastavení a naklápění jídelní desky

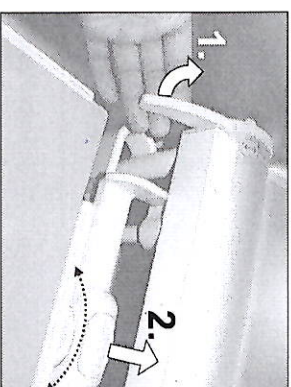

Při manipulaci s jídelní deskou je nutné, aby kolečka stolu byla v zabrzděném stavu!

Po vykloupení jídelní desky z korpusu a jejím uvedení do vodorovné polohy lze nastavit vyhovující výšku jídelní desky. Zdvíhnutím aretační páčky ve směru šipky 1, dojde k uvolnění desky, takže je možno plynulým tažením směrem vzhůru uvést desku do vyhovující výškové úrovně. Po dosažení této požadované výšky je možno naklopit jídelní desku do 7 poloh podle momentální potřeby a účelu použití (psaní, čtení, konzumace jídla). Před nastavením vyhovujícího úhlu naklonu je třeba odjistit pojistku ve směru šipky 2. Přesuňovaná šipka znázorňuje naklápění jídelní desky.



Jízda se stolem

Před jízdou se stolem je nutné uvést kolečka do odbrzděného stavu postupem uvedeným v odstavcích brzdění koleček. Při jízdě samotné se pro řízení stolu používají kovová madla na horní desce. Při jízdě se stolem je vhodné z důvodu snazší manipulace uvést jídelní desku do výchozího stavu, kdy je deska integrována do korpusu stolu.

Držák příslušenství, držák podložní mísy


Dvojice univerzálních držáků příslušenství, kombinované s madlem na ručičku, tvoří standardní součást stolu ELEGANZA. Držáky jsou určeny pro zasouvání různých typů příslušenství s průměrem 16 mm.

Držák podložní mísy, kterým je vybaven pouze stolek ELEGANZA MANO, lze podle potřeby využít i pro umístění přezůvek.

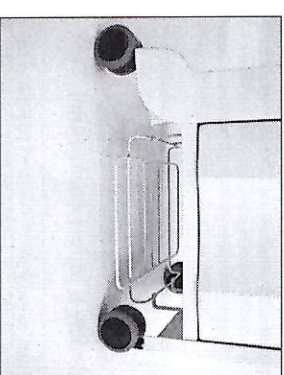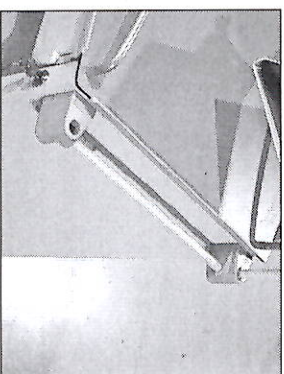

Příslušenství – držák telefonu

Rameno s podložkou pro umístění telefonního přístroje, vhodné pro různé typy telefonů. Zasuva se do univerzálních držáků příslušenství. Rameno je volně otočné.

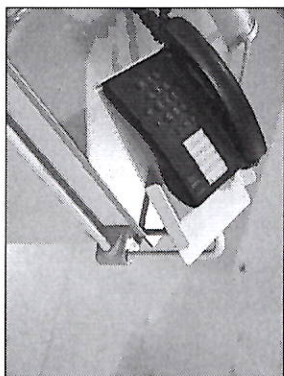

Čištění a dezinfekce

Na celém stolek je možné provádět nutnou očistu a dezinfekci běžnými saponátovými a dezinfekčními prostředky v koncentracích předepsaných pro zdravotnictví (0,5% PERSTERIL, 1% CHLORAMIN aid). Jako další komerčně dostupné prostředky lze doporučit následující výrobky:

Prostředek	Výrobce
TERRALIN® / MIKROZID® / THERMOSEPT®	Schülke & Mayr GmbH
NEODISHER® DEKONTA	Chemische Fabrik Dr. Weigert
COOTRADE® RW	Cootrade GmbH

Čištění a dezinfekci provádějte otíráním vhodným textilním materiálem navlhčeným v roztoku čistícího nebo dezinfekčního prostředku.

- vyvarujte se výsoco alkalických nebo kyselých chemikálií (neměla by být překročena hodnota pH 6 až 8)
- nepoužívejte abrazivní čistič prostředky jako např. písky na nádobí nebo drátěnky apod.
- vyvarujte se použití korozivních nebo leplavých substancí
- nepoužívejte prostředky z nichž se usazuje vápno
- nepoužívejte žádné chemikálie s obsahem látek, které by mohly změnit strukturu a adhezi umělých hmot (rozpuštěná typy aceton, toluen, benzin)

Při použití nevhodného mycího nebo desinfekčního prostředku, nedodržení předpisů výrobce ohledně dávkování a kombinace s jinými prostředky, nebo chybné péči o stolek mohou vzniknout škody resp. ohrožení, za které nemůžeme odpovídat.

Stolky nejsou určeny do myček !

Závady a jejich odstranění

Projev závady	Pravděpodobná příčina	Způsob odstranění
1. Horní zásuvku se zámek nelze zasunout až do konce	1. Zásuvka byla uzamčena ve vysunutém stavu	1. Odemknout zásuvku
2. Horní nebo spodní zásuvku nelze zasunout nebo vysunout	2. Zásuvka je blokována přednímlem	2. Odstranit předmět

3. Centrální brzdění koleček nefunguje	3. Mechanická závada mechanismu centrálního brzdění koleček	3. Nutný servisní zásah
4. Centrální brzdění koleček funguje příliš ztuhlá	4. Špatné seřízení mechanismus centrálního ovládní koleček	4. Nutný servisní zásah – seřízení mechanismu
5. Výškové nastavení nebo náklon jídelní desky nefunguje	5. Mechanická závada na integrované mechanice jídelní desky	5. Nutný servisní zásah
6. Mechanismus jídelní desky nedrží ve vysunuté poloze	6. Špatné seřízení mechanismu jídelní desky	6. Nutný servisní zásah – seřízení mechanismu

Skladování

Pro bezproblémové skladování se doporučuje stolek zabalit nebo zakrýt tak, aby nemohlo dojít k poškození laku a plastových částí.

Pro prostředí skladovacích prostor platí stejné podmínky jako pro pracovní prostředí.

Údržba

Protože vlivem každodenního používání, čištění a dezinfekce stolek dochází k mechanickému a chemickému namáhání některých částí, je třeba nejméně jednou za 3 měsíce zkontrolovat a popřípadě ošetřit silikonovým olejem následující místa na stolek:

- Místa na mechanismu jídelní desky, na kterých dochází ke vzájemnému silovému působení (tření) jednotlivých částí (čep pro náklon desky, svislé trubky vřtanu)
- Uložení koleček
- Vodicí lišty zásuvek

Uživatel je povinen vždy po 12 měsíci periodě zajistit preventivní kontrolu stolek, kterou provede servis výrobce, nebo autorizovaní opravci na základě písemného osvědčení tyto činnosti vykonávat. Příslušné osvědčení vydává výrobce a provedení kontroly je potvrzeno příslušným servisním pracovníkem v seznamu provedeným servisních úkonů.

Zjistíte-li při údržbě neodstranitelné závady, nebo nedostatky, nesmí být stolek nadále používán. V tomto případě ihned kontaktujte výrobce (příp. prodejce).


Ochrana životního prostředí

Společnost LINET, spol. s r.o. si je vědoma nezbytnosti ochrany životního prostředí pro budoucí generace a proto věnuje vysokou pozornost vývoji, inovacím – projektování, výrobě a užívání takových technologií a materiálů, kterým jsou šetrné pro životní prostředí.

Výrobek je konstruován z materiálů, které jsou šetrné pro životní prostředí! Výrobek neobsahuje nebezpečné látky na bázi kadmia, rtuť, azbestu, PCB nebo CFC! Hlučnost výrobku splňuje požadavky předpisů na ochranu veřejného zdraví před nežádoucími účinky hluku a vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb. Dřevěné díly montované na výrobky nejsou vyráběny z exotických dřevin, jako jsou např. Mahagon, Palisandr, Eben, Teak, Grenadil, Santos a nepocházejí z Amazonských deštných pralesů, Afrických deštných pralesů a jiných pralesů.

Všetky odpadní obaly vzniklé po uvedení výrobku do provozu jsou označeny v souladu s platnými předpisy o obalech. Obalový odpad vzniklý při uvedení výrobku do provozu roztřídte dle uvedených grafických symbolů a předejte oprávněné osobě k jeho dalšímu využití.

Výrobek obsahuje recyklovatelné ocelové, plastové a elektronické součásti – pro účely optimální recyklace v době ukončení provozu výrobku separejte jednotlivé části tak, aby mohly být dále využity suroviny, ze kterých byl výrobek vyroben (viz. SCHEMA).

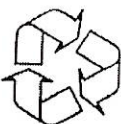

Výrobek může obsahovat olověné akumulátory (AKB) označené limto grafickým symbolem:


Po ukončení jejich životnosti je odevzdávejte oprávněné osobě ke zpětnému odběru (za zpětný odběr neplatíte poplatek).



Výrobek není určen k odstranění jako součást komunálního odpadu!



Informace pro uživatele elektrických a elektronických zařízení (viz. SCHEMA):

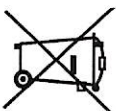

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické součásti (odpad z elektrických a elektronických zařízení = OEEZ/WEEE) nesmí být odstraněny (likvidovány) společně s komunálním odpadem. Za účelem správného odstranění celého výrobku odevzdejte OEEZ/WEEE na určených místech k tomuto účelu specializovaných firem, kde budou přijata zdemna.

Vhodným odstraněním tohoto výrobku pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od pověřených úřadů ochrany životního prostředí, případně nejbližšího sběrného místa pro separovaný sběr odpadů.



V případě nesprávného postupu při odstraňování odpadů mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou formu odstranění separeovaného OEEZ/WEEE (elektrických a elektronických zařízení) a olověných akumulátorů si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení.

Chraňte své zdraví a životní prostředí. Děkujeme.

Výrobek obsahuje elektrická a elektronická zařízení, které po ukončení životního cyklu odevzdávejte společnosti LINET..

Záruka a servis

Na stolek je poskytována záruka 24 měsíců počínaje dnem dodání, pokud kupní smlouva neurčí jinak!

Zaručení a pozáruční opravy provádí výrobce, nebo autorizovaní opravci na základě písemného osvědčení o způsobilosti tyto činnosti vykonávat. Příslušné osvědčení vydává výrobce.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

datum vydání: 1. 4. 2004

Prohlášení o shodě vydává:

Obchodní jméno Linet spol. s r. o.
Sídlo Železčice 5, 274 01 Slaný
IČO 00507814
Telefon 312576111
Fax 312522668

Jako výrobce výrobku – název (obchodní značka):

Ve variantách:

Popis a určení funkce výrobku:

Klasifikace výrobku jako prostředku zdravotnické techniky:

ELEGANZA
Classic, Mano
12GXXXXXXXXXX, 121EXXXXXXXXXX, 123EXXXXXXXXXX
(specifikace variant – viz technická dokumentace)
Pacientský stolek k lůžku
I mesterlini, bez měřicí funkce

A) Prohlášení

Prohlašuji, že uvedený výrobek je za podmínek obvyklého použití v souladu s návodem k obsluze bezpečný, a že byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uvedených na tñ s technickou dokumentací, se základními požadavky nařízení vlády, která se na něj vztahují a s požadavky technických předpisů uvedených v odstavci B.

B) Splněné technické požadavky

Vlastnosti tohoto výrobku splňují technické požadavky, které se na něj vztahují a které jsou uvedeny v Nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky.

C) Způsob posouzení shody

posuzování shody bylo provedeno postupem stanoveným v § 9 nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky.

D) Použité normy

Uvedený výrobek odpovídá těmto technickým předpisům, které byly použity při posuzování shody: ZNS_01.

Ing. Zbyněk Frolik
jednatel a ředitel společnosti



Kontakty

LINET spol. s r.o. Želevčice 5, 274 01 Slaný

Vaše dotazy směřujte na:

- Obchodní oddělení,
- Servisní a reklamační oddělení,

spojení:

Tel.: 312 576 111

Tel.: 312 576 259

Fax: 312 522 668

E-mail: info@linet.cz

<http://www.linet.cz>