

Průhledný ženský/mužský katetrizační model

M160, M160-1

Návod k obsluze



 **HELAGO**®
CZ

Kladská 1082
500 03 Hradec Králové 3
tel: 495 220 229
495 220 394
GSM brána: 602 123 096
E-mail: info@helago-cz.cz
<http://www.helago-cz.cz>


Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod.

Možnosti výuky

1. Intermittentní uretrální katetrizace
2. Nepřetržitá uretrální katetrizace
3. Mytí genitálií
4. Kontrola správného zavedení katétru

Seznam jednotlivých částí

1. Základní jednotka – 1 ks
2. Irigátor – 1 ks
3. Stojan na irigátor – 1 ks
4. Silikonový olej – 1 láhev
5. Dětský pudr – 1 ks
6. Katétr pro uretrální katetrizaci – balení po 2 ks (8EG katétr Nelaton, 16 Fr katétr Balloon)

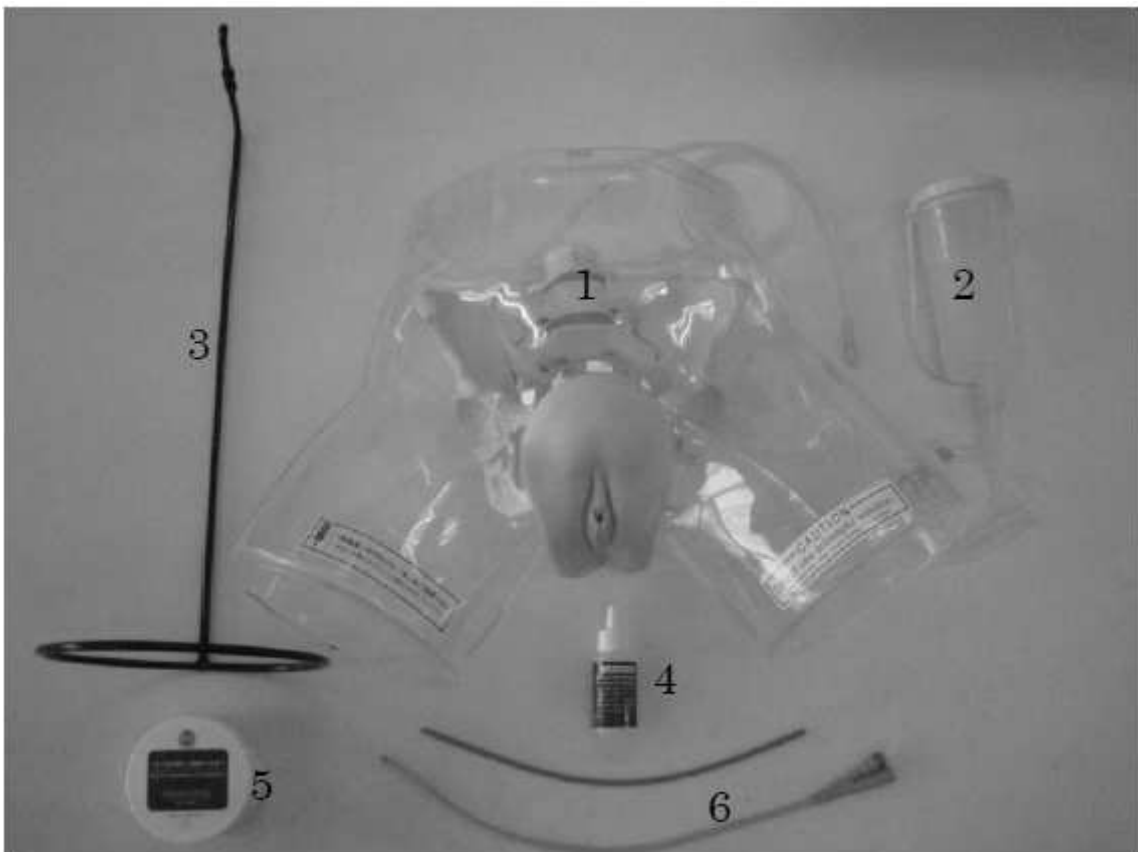

Upozornění při používání

- Pokud by byly produkty z pryskyřice delší dobu v kontaktu s modelem vnějších částí genitálií, mohlo by dojít k jejich deformaci. S modelem zacházejte opatrně.
- Aby byl model co nejvíce podobný skutečnosti, jsou vnější genitálie vyrobeny z jemného materiálu. Mohou se proto snadno ušpinit. Pamatujte, že popisky perem nebo značkovačem nejsou odstranitelné.
- Menší zašpinění na přední části a uvnitř modelu můžete otřít jemným hadříkem navlhčeným ve vodě a neutrálním čistícím prostředku. Nepoužívejte rozpouštědla – ředidla, která by mohla rozpustit části z pryskyřice.
- Během výuky mějte nasazenou vyplachovací láhev ve stojanu ve výšce cca 30 cm nad otvorem do močového měchýře (používejte dodaný stojan). Pokud byste zavěsili láhev výše, mohlo by dojít k vytékání tekutiny. Při plnění vodou pamatujte, že voda by měla dosáhnout maximální hladiny 300cc, jinak by mohla vytékat.
- Pokud jsou externí genitálie a močový měchýř k sobě napojeny, močový měchýř z modelu neodstraňujte. Vnější genitálie jsou také připojeny k hlavní jednotce (průhledná část modelu), takže je nelze vyjmout. Neodstraňujte z močového měchýře ani obě hadičky (mohlo by dojít k poškození modelu).
- Průhledná část modelu se může snadno poškrábat nebo prasknout, proto s modelem zacházejte opatrně. Nevystavujte ho nárazům.
- Před zavedením do močového měchýře nejprve katétr omyjte vodou a naneste silikonový olej. Používejte pouze dodaný olej, jiné chemické prostředky by mohly model poškodit.
- Pokud zjistíte nějakou závadu během výuky, přestaňte model používat a obraťte se na svého dodavatele.
- Model je určen k pokročilé výuce, ale výrobce nezaručuje, že výuka s modelem bude mít stejný efekt jako je ošetření skutečného pacienta.
- Upozorňujeme předem na to, že výroba modelu se průběžně vylepšuje bez předchozího oznámení.

Katetrizace močového měchýře

1. Vyjměte model z obalu a položte na pevný stůl.

2. Připojte hadičku s červeným označením vedoucí z hlavní jednotky do irigátoru (viz obrázek vpravo).

3. Nasadíte irigátor do stojanu (výčnělkem dopředu).

4. Na irigátor nasadíte hadičku (viz obrázek vpravo).

5. Do irigátoru nalijte 500 cc vody, otevřete svorku a nechte naplnit močový měchýř. Buďte opatrní při doplňování vody do irigátoru. Mohlo by dojít k vytékání vody, pokud by v irigátoru zůstalo více než 300 cc vody.

6. Před zavedením katétru naneste na jeho konec nejprve lubrikant. (Pokud byste zaváděli katétru bez lubrikantu, mohlo by dojít k odření a poškození močové trubice. Nevyvíjejte také větší tlak při zavádění. Pokud by byl katétru pod nesprávným úhlem, nelze ho zavést).

7. Jakmile se katétru Nelaton dostane do močového měchýře, začne správně odtékat voda (jako při močení). Nezapomeňte na misku, kam by voda z katétru odtékala. (V případě potřeby doplňte do irigátoru vodu).

8. Odstraňte katétru a začněte s výukou.



Mytí genitálií

1. Výuku provádějte vodou.

Při používání vody může být povrch modelu lepkavý, ne úplně hladký. Nejedná se o problém v kvalitě materiálu, ale buďte opatrní, aby se vrchní část nepotrhal.

2. Nepoužívejte žádné chemikálie (model by se tím poškodil)

Uložení modelu

1. Pokud jsou vnější genitálie špinavé, otřete je jemným hadříkem navlhčeným v neutrálním čistícím prostředku. Poté je pomocí hadříku s čistou vodou otřete.
2. Model ukládejte až po kompletním odčerpání vody. Zvedněte ho a nechte nad miskou vodu odtéci.



3. Před uložením do kufříku nechte model řádně proschnout a naneste silikonový olej do močového ústí a na ostatní části genitálií pudr.
4. Nenechávejte model vystavený přímému slunečnímu záření nebo v místě s vysokou teplotou a vlhkostí. Mohlo by dojít k jeho deformaci.