

AirSim Multi
Model s nasální částí a bradou
Příručka pro uživatele

AA11100



Kladská 1082
500 03 Hradec Králové 3
tel: 495 220 229
495 220 394
GSM brána: 602 123 096
E-mail: info@helago-cz.cz
<http://www.helago-cz.cz>

Obsah balení:

- 1 černý přepravní kufřík
- Návod k použití
- 1 láhev lubrikantu
- 3 modré plicní vaky - dospělé

Než začnete model používat:

- Vyjměte ochranný molitan z hlavy simulátoru.
- Upevněte model na vhodnou pracovní plochu pomocí šroubů na přísavkách (pracovní plocha by měla být hladká, aby model dobře držel).
- Uvolněte černý zámek na krku pro snadnější pohyb s hlavou. Nastavte hlavu do požadované polohy a poté uvolněný zámek uzavřete.
- Zkontrolujte, zda jazyk obsahuje dostatečné množství vzduchu. Nafukovat i vyfukovat ho můžete pomocí injekční stříkačky. Tímto způsobem vytvoříte obtížnost provádění intubace.
- Zkontrolujte plicní vaky a žaludek, zda jsou upevněny k dýchacím cestám a jícnu.
- Naneste dostatečné množství lubrikantu na dýchací cesty a další používané pomůcky.
- Nyní je model připraven k použití.

Model AirSim Multi je vhodný pro výuku:

- Nasotracheální intubace
- Zavedení nasogastrické trubičky
- Technik ventilace pomocí vaku a masky
- Použití supraglotických nástrojů
- Přímé laryngoskopie
- Zavedení endotracheální hadičky
- Vyšetření pomocí optických vláken
- Techniky izolace jedné plíce
- Zavedení Combitube

Doporučujeme použití následujících velikostí nástrojů:

- Pro nazální intubaci: 7,0 - 7,5 mm ID
- Pro orální intubaci: 8,0 – 9,0 mm ID
- LMA laryngeální masky o velikosti 3 - 5
- Podobné velikosti pro další supraglotické nástroje

Péče a údržba:

Skladujte v čistém a suchém prostředí bez tepla a přímého slunečního záření, zamezte kontaktu s kovy, rozpouštědly, oleji nebo mastnými materiály a agresivními čistícími prostředky. Pokud model nepoužíváte, ukládejte jej do černého přepravního kufříku.

Důkladně omyjte dýchací cesty v teplé vodě s mýdlem nebo podobným čistícím prostředkem, dokud nezmizí všechny viditelné nečistoty.

Dle pokynů výrobce lze na čištění použít jemné čistící prostředky nebo enzymatické čistící prostředky ve správném rozředění. Čistící prostředky nesmí obsahovat žádné látky, které by mohly dráždit kůži nebo sliznici.

K čištění nepoužívejte následující prostředky:

- Germicidy, dezinfekční prostředky, nebo chemické prostředky jako je glutaraldehyd
- Etylenoxidy, čistící prostředky s fenolovým základem nebo čistící prostředky obsahující jód