

Injekční břicho

WA28395



Kladská 1082
500 03 Hradec Králové 3
tel: 495 220 229
495 220 394
fax: 495 220 154
GSM brána: 602 123 096
E-mail: info@helago-cz.cz
<http://www.helago-cz.cz>

Tato měkká replika břicha je neocenitelnou pomůckou pro pacienty, které je potřeba naučit správné zavedení a otočení infuzního setu pro inzulinové pumpy, aby se vyhnuli oblasti 5 cm kolem pupku. Dále je naučí píchat si injekce sami. Trenažér má realistickou kůži, která je na pohmat podobná dolní části břišní tkáně. Simulátor má měkkou plastovou zadní stranu, která zabraňuje jehlám projít skrz, a otvory, které umožňují procházet materiálem vzduch a vysoušet se. Buďte vždy opatrní při používání jakýchkoliv jehel a neodstraňujte kryt, pokud není model připraven k vpichu.

Správné ošetření a péče o simulátor jsou důležité věci. Injekční břicho je původně zamýšleno na jedno použití, ale při správném používání a péči bude sloužit po dlouhou dobu. Do simulátoru může být vstříkována destilovaná voda, ale čím více tekutiny je vpuštěno, tím déle se vypařuje. Doporučujeme vpichovat pouze vzduch. Nepoužívejte skutečný inzulin nebo jiné léky, protože by mohly poškodit materiál. Použití nejmenších možných jehel při simulaci injekcí a střídání míst vpichu pomůže prodloužit životnost simulátoru.

Nenechávejte simulátor v kontaktu s inkoustem, novinami nebo jakýmkoliv jiným tištěným materiálem, aby nezůstaly na modelu trvalé skvrny.

Čištění: Otírejte model jemným hadříkem navlhčeným v roztoku jemného mýdla a teplé vody. Takto ošetřený model otřete teplou vodou bez mýdla a nechte vysušit. Čisticí prostředek „Nasco Replica Cleaner“ můžete použít pro čištění modelu, ale neodstraní skvrny od inkoustu.