

Model péče o stomie W526

Návod k obsluze



Kladská 1082
500 03 Hradec Králové 3
tel: 495 220 229
495 220 394
fax: 495 220 154
GSM brána: 602 123 096
E-mail: info@helago-cz.cz
<http://www.helago-cz.cz>

Model péče o stomie

Pokyny

Model je určen k výuce péče o uměle vytvořené otvory na břiše. Studenti se učí čistit, léčit a pečovat o stomie a okolní kůži. Můžete model také použít k předvedení připojení aparátů pro ileostomii a kolostomii a k výuce výměny obvazů.

Péče a čištění

Tento model je vyroben ze syntetické tkáně BIOLIKE a mělo by se s ním zacházet opatrně jako s lidskou tkání. Abyste zajistili maximální životnost modelu, řiďte se následujícími pokyny. Před každým použitím nasypete na model pudr, aby byl na pohmat hladký. Před zavedením aparátu do stomického otvoru naneste lubrikant na vodní bázi. Nedostatečné množství lubrikantu může způsobit natržení modelu. V případě potřeby čistěte model jemným mýdlem a teplou vodou, ale nenamáčejte jej do vody! Lehce model osušte čistou utěrkou a opět napudrujte. Pamatujte, že některé dezinfekční roztoky mohou model znečistit. Pokud máte nějaké pochybnosti, vyzkoušejte čisticí roztok nejprve na malém místě. Nedávejte model do kontaktu s inkoustovými nebo potištěnými materiály. Dejte pozor, abyste model nepropíchlí nehty nebo jinými ostrými předměty. Pokud model nepoužíváte, uložte jej do ochranného kufříku. Model nenechávejte v blízkosti tepelného zdroje nebo na přímém slunečním světle.

UPOZORNĚNÍ:

Tento model je určen pouze za účelem vzdělávání.

**A. Dočasná kolostomie s
dvojitým očkem**

**B. Čerstvá příčná
kolostomie**

C. Ileostomie

**D. Kolonostomie na
sestupném tračniku**

