

# Mužský a ženský тренаžér katetrizace

**PP01932 (ženský)**  
**PP01931 (mužský)**

**Návod k obsluze**



Kladská 1082  
500 03 Hradec Králové 3  
tel: 495 220 229  
495 220 394  
GSM brána: 602 123 096  
E-mail: [info@helago-cz.cz](mailto:info@helago-cz.cz)  
<http://www.helago-cz.cz>

Modely katetrizace jsou určeny k výuce a procvičování procedur při zavádění urinálních katétrů.

Balení obsahuje genitálie se stojanem.

Požadované pomůcky: katétr Foley 16 Fr, lubrikant na rostlinné bázi, injekční stříkačka

Postupy před použitím trenažéru:

Před zahájením výuky zavádění katétru je nutné zavést lubrikant do mužské močové trubice. Naplňte injekční stříkačku 0,5 cc lubrikantem na rostlinné bázi a injektujte do penisu. Pouze lubrikace katétru není dostačující. Převážná většina lubrikantu by se odstranila u vstupu do močové trubice. Není nutné mezi každou výukou provádět lubrikaci. Stačí před zahájením výuky.

Pro naplnění trenažéru cca 227 g tekutiny (simulované moči) použijte otvor na zadní straně trenažéru.

Postupy během výuky:

Naneste menší množství lubrikantu na rostlinné bázi na katétr.

Zavádějte pomalu katétr močovou trubicí, až bude tekutina (moč) katétreem vytékat.

Nafoukněte balónek Foley a katétr upevněte.

Postupy po ukončení výuky:

Vyfoukněte balónek Foley.

Opatrně vyjměte katétr z genitálií.

Vyprázdněte zásobník a před uložením trenažér nechte vyschnout.

Čištění a údržba:

Povrch trenažéru čistěte vodou a rozpuštěným čisticím prostředkem.

Pro odstranění oleje nebo zbytků z močové trubice použijte velký čistič rourek.

Doporučujeme občas provádět dezinfekci trenažéru, aby se předešlo riziku mikrobiálního znečištění ve vlhkém prostředí, zvláště při delší době skladování.