

Simulátor podání klyzmatu LF00957

Návod k obsluze



Kladská 1082
500 03 Hradec Králové 3
tel: 495 220 229
495 220 394
fax: 495 220 154
GSM brána: 602 123 096
E-mail: info@helago-cz.cz
<http://www.helago-cz.cz>

O simulátoru


Simulátor slouží pro demonstraci a nácvik podání klyzmatu. Pro zavádění tekutin lze používat standardní zařízení. Se simulátorem zacházejte jako se skutečným pacientem, aby nedošlo k jeho poškození.

Seznam součástí modelu

1. 1x vak pro klyzma
2. 1ks latexové rukavice
3. Lubrikant Hevi-Lube
4. Hadřík
5. Vinylová hadička v délce cca 45 cm
6. Přenosný kufřík

Vnitřní struktura

Simulátor velmi detailně kopíruje skutečné lidské tělo. Horní část hýždí je flexibilní, takže ji student musí zvednout, aby mohl provést aplikaci. Umělé střevo se přizpůsobí zaváděné tekutině.

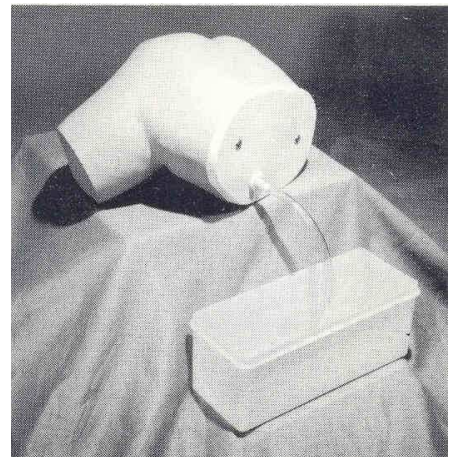

Všeobecné pokyny k použití

1. Naplňte jednotku pro aplikaci klyzmatu čistou vodou.
2. Zavěste vak maximálně do výšky 45 cm nad simulátor.
3. Před každým použitím simulátoru musí být anální otvor a katétr potřeny tenkou vrstvou lubrikantu – používejte pouze lubrikant Hevi-Lube (LF1050UA). Upozornění: Nepoužívejte velké množství lubrikantu, které by mohlo zablokovat propustnost hadičky.
4. Odtoková hadička, která je uložena v kufříku, musí být před zavedením tekutiny připojena k vrchní části simulátoru. Odtokovou hadičku umístěte do umyvadla, misky nebo kbelíku (nejsou součástí).

Procedury, které lze na simulátoru provádět

Na simulátoru lze provádět standardní procedury spojené s podáváním klyzmatu bez nutnosti dalšího příslušenství.

Péče o simulátor

Běžné nečistoty odstraňte jemným mýdlem a vlažnou vodou. Odolné tekutiny odstraňte REN čističem. Jednoduše postříkejte ušpiněné plochy a utřete je jemnou tkaninou nebo papírovým ubrouskem.

Před uložením do kufříku model řádně vysušte. Podržte simulátor vzhůru nohama a nechte odtéci veškerou tekutinu. Odpojte odtokovou hadičku. Vysušte všechny povrchy.

Upozornění

Rozpouštědla nebo žíraviny by mohly simulátor poškodit. Nikdy nepokládejte simulátor na potištěný papír nebo plast a nepište na něj propisovací tužkou.

Náhradní díly

W9919UA REN čistič

LF1050UA Lubrikant Hevi-Lube (cca 0,5 l)

LF1024UA 45cm vinylová hadička o průměru 12,5 mm